

Mund-Nasen-Maske KN95



Mund-Nasen-Maske zum Einmalgebrauch – KN95*

Die Mund-Nasen-Maske KN95 bietet eine physikalische Barriere gegen die Ausbreitung von größeren Tröpfchen des Trägers – wie beispielsweise durch Husten. Sie zeichnet sich durch einen hohen Tragekomfort aus und eignet sich daher für längeres Tragen – auch bei sensibler Haut.

- ✓ Nasenklammer, elastische Ohrschlaufen und hautfreundlicher Vliesstoff
- ✓ 4-lagige, atmungsaktive Maske
- ✓ GB 2626-2006, Typ KN95
- ✓ Physikalisches Filtrationssystem:
Polytetrafluorethylen (PTFE)-Nanomembran

Schnelltests


Labordiagnostik

Laborservice

Beratung & Service


Gebrauchsanleitung

1




Falten Sie die Maske auseinander. Setzen Sie die offene Seite der Maske unter dem Kinn an, sodass die Nasenklammer an Ihrem Gesicht fest anliegt.

2



Ziehen Sie die elastischen Bänder vorsichtig mit beiden Händen hinter Ihre Ohren. Stellen Sie sie so ein, dass sie bequem sind. Hinweis: Zerren Sie nicht an den Bändern.

3



Vergewissern Sie sich, dass die Maske richtig sitzt.

Mund-Nasen-Maske KN95

Diese atmungsaktive, 4-lagige Maske besteht aus hautfreundlichen Vliesstoffen sowie elastischen Ohrschlaufen und einer Nasenklammer aus Metall für optimalen Sitz. Die Masken sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt.



Artikelnummer	Spezifikationen	Verfügbare Testberichte	Packungsgröße
130003N-10	GB 2626-2006 Bakterielle Filterleistung $\geq 95\%$ * Atemwiderstand: Inhalation ≤ 350 Pa Exhalation ≤ 250 Pa	1. Testbericht zur bakteriellen Filterleistung 2. Testbericht zum Atemwiderstand	10 Stück / Packung

* Von einem deutschen Textilinstitut bestätigt

Rev01.01/XX0745de00011
Rev01.01/DE45de00016

Gerne beantwortet unser **Vertriebsteam** alle Ihre Fragen unter
 Tel.: +49 941 29010-0 oder +49 2841 99 820-0 und per E-Mail vertrieb@nal-vonminden.de

We help you care!

We help you care!

Schnelltests

Labordiagnostik

Laborservice

Beratung & Service